

medi



Levamed stabili-tri

Attelle stabilisatrice
pied/cheville

Rééducation totale
en 3 phases



Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D - 95448 Bayreuth
Germany
P +49 921 912-0
F +49 921 912-783
export@medi.de
www.medi.de/en

medi France
ZI Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93290 Tremblay en France
cedes
Tel; 01 48 61 76 10
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

Medi orthopédie : orthèses élastiques de contention.
Indications : protection et stabilisation des articulations dans le traitement
des pathologies d'origine traumatique ou rhumatismale. La prise de mesures,
précise, permet de bien respecter le tableau de taillage. L'essayage garantit
l'adaptation parfaite au patient. Consulter attentivement la notice
d'utilisation et les indications. En cas de gêne ou d'inconfort, suivre les
conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré cette orthèse
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre
de cette réglementation le marquage CE. Fabricant : société Medi. 2018



97F03 / 03.2018

medi. I feel better.

Une guérison en 3 phases

immobilisation / stabilisation / mobilisation

Les blessures des ligaments de la cheville sont relativement fréquentes. Dans la plupart des cas, les ligaments latéraux sont affectés. Levamed stabili-tri est une orthèse qui correspond aux dernières procédures de traitement pour les blessures aiguës de la cheville. La combinaison équilibrée de l'immobilisation et de la mobilisation offre à la cheville la stabilité nécessaire pendant les trois phases de guérison.

Indications

- entorses de la cheville (grade 2 à 3)
- instabilité chronique de l'articulation tibio-tarsienne
- soin post-opératoire après intervention chirurgicale sur l'appareil ligamentaire de l'articulation de la cheville.

Avantages thérapeutiques

- adaptable aux trois phases de guérison
- la languette de blocage favorise le maintien du pied (évite l'avancée de l'astragale)
- l'élément de stabilisation médial immobilise le pied et soulage les douleurs
- la sangle stabilisatrice guide le pied dans une légère pronation et favorise le processus de guérison
- le tricot de compression améliore la proprioception et permet une réduction plus rapide des hématomes et des oedèmes.

Avantages supplémentaires pour les patients

- large ouverture pour une mise en place favorisée
- boucles click-in pour un laçage simplifié et un confort optimum
- brevets Climafresh et Clima Comfort présents dans le tricot
- l'orthèse peut être portée confortablement avec des chaussures.



Levamed stabili-tri



Prise de mesure:
Tour de cheville en cm juste au-dessus des malléoles

Levamed stabili-tri				
Tour de cheville en cm	Tailles	gauche	droite	
17 – 21	I	4051526902787	4051526902824	
21 – 24	II	4051526902794	4051526902831	
24 – 27	III	4051526902800	4051526902848	
27 – 30	IV	4051526902817	4051526902855	

1. Phase aiguë

Soulager la douleur avec une forte stabilisation

Immobilisation totale

Utiliser l'orthèse avec tous les accessoires inclus (éléments de stabilisation et sangle).

Propriétés

- grande stabilisation durant la phase inflammatoire
- aide à réduire l'œdème et soulage la douleur
- la languette de verrouillage évite le déplacement antérieur de l'astragale

Quelle mobilité pour le patient?

- pas de sport
- marche aidée par béquilles

2. Phase de rééducation

Stabilisation du pied avec mobilisation possible

Première mobilisation

L'élément rigide est enlevé, le patient porte l'orthèse avec la sangle stabilisatrice.

Propriétés

- possibilité de mouvements contrôlés
- la languette de blocage et la sangle assurent une stabilité constante
- l'élément rigide doit être inséré à nouveau pour la nuit

Quelle mobilité pour le patient?

- sport doux (vélo)
- physiothérapie (réadaptation des déficiences)

3. Phase de récupération

Mobilisation avec soutien

Retour à l'activité

La sangle est enlevée, seul le tissu compressif et la languette de blocage restent positionnés sur l'orthèse.

Propriétés


- liberté de mouvement
- soutien de l'articulation par la languette de blocage

Quelle mobilité pour le patient?

- reprise de l'activité sportive
- coordination, étirement, amélioration de la stabilité, travail musculaire

Stabilité


Mobilité

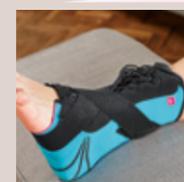


L'orthèse, avec tous les accessoires, immobilise et protège le pied.




L'élément rigide de stabilisation entoure le talon et assure l'immobilisation de la cheville.

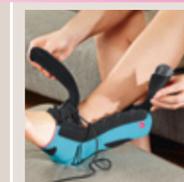


L'élément stabilisateur rigide est enlevé permettant ainsi d'effectuer des petits mouvements.

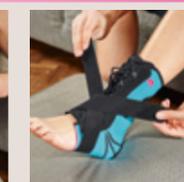

La sangle reste sur l'orthèse, la languette de blocage et le tissu compressif assurent la stabilisation.

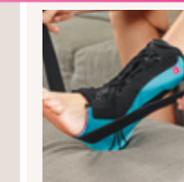

Maintenant la sangle est retirée, seul le tricot compressif et la languette de blocage maintiennent le pied.

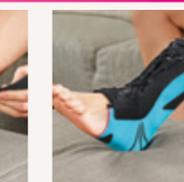

Tous les éléments sont retirés, désormais l'orthèse offre un support pour la phase de récupération.

Levamed

Levamed Strap

Attelle de cheville medi-cast

Levamed stabili-tri

Indications

- instabilité de l'articulation tibiotarsienne
- entorses
- épanchements articulaires et oedèmes dus à l'arthrite ou arthrose
- inflammation chronique, post-opératoire ou post-traumatique

- instabilité légère à modérée de l'articulation tibiotarsienne
- prévention et reprise d'activité sportive

- entorse de cheville récente grave ou de gravité moyenne

Stabilité

Stabilité

Mobilité

- entorses de la cheville (grade 2 à 3)
- instabilité chronique de l'articulation tibio-tarsienne
- soin post-opératoire après intervention chirurgicale sur l'appareil ligamentaire de l'articulation de la cheville